

PARTIKELFILTERNDE HALBMASKE

LSD008 FFP2 NR

Nach Standard: EN 149:2001 +A 1 :2009 Verordnung (EU)2016/425

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen kann die Wirksamkeit dieser partikelfiltrierenden Halbmaske ernsthaft beeinträchtigen und zu Krankheit, Verletzung oder Tod führen.“

Ein richtig ausgewähltes Atemschutzgerät ist unerlässlich. Vor der Verwendung am Arbeitsplatz muss der Träger vom Arbeitgeber in der korrekten Verwendung des Atemschutzgeräts gemäß den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsnormen geschult werden. Diese partikelfiltrierende Halbmaske liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie sie nur in ausreichend belüfteten Räumen, die ausreichend Sauerstoff enthalten

Entsorgen Sie das Atemschutzgerät und ersetzen Sie es durch ein neues, wenn eine übermäßige Verstopfung der partikelfiltrierenden Halbmaske Atembeschwerden verursacht oder die partikelfiltrierende Halbmaske beschädigt wird. Verlassen Sie das kontaminierte Gebiet, wenn Schwindel, Irritation oder andere Beschwerden auftreten

EINSCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG

1. Verwenden Sie unter den folgenden Umständen nicht das Atemschutzgerät und betreten oder halten Sie sich nicht in einem kontaminierten Bereich auf:
 - a) Die Atmosphäre enthält weniger als 19,5% Sauerstoff.
 - b) Wenn Sie eine Verunreinigung riechen oder schmecken
 - c) Zum Schutz gegen Gase oder Dämpfe
 - d) Kontaminanten oder ihre Konzentrationen sind unbekannt oder unmittelbar gefährlich für Leben oder Gesundheit.
 - e) Für Sandstrahlen, Farbspritzverfahren und Asbest.
 - f) In explosionsgefährdeten Bereichen
2. Modifizieren oder missbrauchen Sie die Maske nicht
3. Verwenden Sie die partikelfiltrierende Halbmaske nicht bei Gesichtsbehaarung oder anderen Bedingungen, die eine gute Abdichtung des Gesichts verhindern können, die Anforderungen an die Leckage werden nicht erfüllt.
4. Die partikelfiltrierende Halbmaske muss vor jedem Gebrauch inspiziert werden, um sicherzustellen, dass in der Atemzone keine Löcher vorhanden sind, mit Ausnahme von Einstichen um die Maske herum und den Klammern, und dass keine Schäden aufgetreten sind. Vergrößerte Löcher, die durch gerissenes oder zerrissenes Filtermaterial im Bereich von Klammerstichen entstehen, gelten als Beschädigung.
5. Diese Atemschutzmaske trägt zum Schutz vor bestimmten partikelförmigen Verunreinigungen bei, schließt jedoch nicht aus, dass man sich dem Risiko aussetzt oder an einer Krankheit oder Infektion erkrankt. Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.
6. Diese mit "NR" gekennzeichnete partikelfiltrierende Halbmaske darf nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden.

ANPASSANLEITUNG

1. Öffnen Sie die Maske und ziehen Sie mit beiden Händen an den Ohrschlaufenbändern. Stellen Sie sicher, dass sich der Nasenbügel über der Maske befindet.
2. Bedecken Sie Mund und Nase mit der Maske
3. Ziehen Sie die Ohrschlaufenbänder hinter Ihre Ohren und hängen Sie den Haken zur Verlängerung an die Bänder
4. Stellen Sie die Kapuze entsprechend dem gewünschten Komfort ein
5. Stellen Sie die Dichtigkeit der Maske entsprechend der Gesichtsform ein. Drücken Sie den Nasenbügel, um die Dichtigkeit einzustellen, und atmen Sie aus, um sicherzustellen, dass keine Luft austritt.



6. Wechseln Sie die Maske sofort, wenn das Atmen schwierig wird oder die Maske beschädigt oder zerdrückt wird.
7. Wechseln Sie die Maske falls eine ordnungsgemäße Abdeckung des Gesicht nichtz erreicht wird.
8. Die sorgfältige Befolgung dieser Anweisungen ist ein wichtiger Schritt zum sicheren Gebrauch des Atemschutzgeräts



Partikelförmige Atemschutzgeräte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU)2016/425. Sie wurden gemäß EN 149:2001 +A1 :2009 FFP2 NR getestet.

ZERTIFIZIERT DURCH CCQS Services Limited

Address: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Dublin Ireland

Hersteller:

Shandong C.I.R.S Garments Co., Ltd.

Adresse: Mishui Industrial Park Xingfu Road, Gaomi City, Shandong Province, P.R. China

Importiert von : PORTWEST - Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Download der Konformitätserklärung unter : bit.ly/3gtk0XX